

SHIHOさん
出演の
テレビCM
放映!

始めましょ。 電解水素水のある上質な生活

水素が豊富

アルカリ性

おいしい水



当社イメージキャラクター モデル:SHIHO

連続生成型 電解水素水整水器

TRIM ION HYPER

医療機器製造販売認証番号：226AGBZX00012000

効果/胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

電解水素水整水器とは?

浄水された水をさらに電気分解して、抗酸化性がある水素を豊富に含んだアルカリ性の電解水素水をつくります。これは医薬品医療機器等法(旧薬事法)で胃腸症状改善の効果が認められた家庭用管理医療機器です。

3種類のお水を使い分け

電解水素水

飲み水・料理に

酸性水

洗顔・洗いに

浄水

粉ミルク・薬の服用に

TRIM
NIHON TRIM CO.,LTD.

株式会社日本トリム

東証一部上場
証券コード6788

●(社)日本経済団体連合会会員
●(社)日本病院会会員

●(財)機能水研究会興財団理事
●(社)日本ホームヘルス機器協会正会員

フリーダイヤル




0120-328-106

受付時間/9:00~18:00(土日祝日は休業日)
最寄りの営業所に繋がります。

シェアNo.1

日本トリムの電解水素水整水器は、
整水器市場の59.4%(売上高)[※]を占め、
国内No.1の販売実績を獲得しています。

※矢野経済研究所
「2014年版 浄水器 整水器市場の実態と展望」より

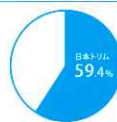

TRIM ION HYPER は、次世代型の高性能整水器です。


電解水素水で
ウォーター
ヘルスケア

高性能カートリッジ!

PREMIUM マイクロカーボンカートリッジ

JIS規格13物質※1+3物質※2を8トン除去!

マイクロカーボンカートリッジは、内部に無数の微細孔をもつ多孔性の炭素質で構成されており、溶解物質の吸着が速く、濁りなどの微粒子までしっかり取り除きます。新成型法により、マイクロカーボンだけでJIS規格13物質及び浄水器協会自主規格3物質の除去が可能になりました。また、ろ材が目詰まりしにくく、水が流れやすいのが特長です。

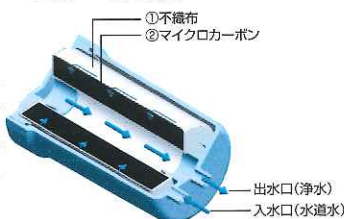

① 不織布

繊維を3次元構造に重ね合わせ結合した多孔質シート。マイクロカーボンを通る前に、まずこの部分で大きい粒子の物質を除去します。

② マイクロカーボン(非常に細かい活性炭)

当社のマイクロカーボンCM2カートリッジは、NSF認証を取得した活性炭(当社共同開発)を使用しています。

NSF認証活性炭メーカー / 品番
クラレケミカル株式会社 / T-SCO 60/150THM
フタムラ化学株式会社 / CN8200G


NSF認証
とは

世界的に認められた公衆安全衛生に係わる非営利機関であるNSF
インターナショナルが制定した公衆安全衛生に関わる規格であり、
認証には厳しい試験をクリアしなければなりません。

●浄水カートリッジの交換時期は、水の過量・水質・水圧などにより異なります。
●交換時期のお知らせは、最初のご使用から約1年で表示されます。また、総通水量が8tに達した場合は1年以内でも表示されます。
表示されたら、カートリッジをご交換ください。

ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式で 安定した電解能力を持続

〈トリムイオン HYPER〉は水を電気分解して電解水素水を生成します。そのとき、水の中に含まれているミネラル等が電極板に引き寄せられて付着し、長期間使用していると電解能力が低下します。そこで〈トリムイオン HYPER〉は定期的に電極の極性と水路を切り替える独自のダブル・オートチェンジ・クロスライン方式を採用。ミネラル等の付着を防ぎ、安定した電気分解を行います。

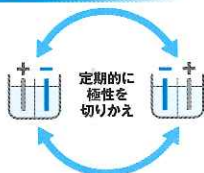

コンパクト設計そして経済的

場所をとらないコンパクト設計※1なので、シンクサイドにもすっきり置いていただけます。また、1日に2リットルを5年間使用した場合、1リットルあたりのコストは約6円※2と、とても経済的です。

※1 高さ239×幅234×奥行112.5(mm)

※2 サンプル例であり、ご使用の地域やご使用方法によって金額は前後します。

最新技術を結集した新機能搭載!

●溶存水素濃度(目安)表示

水素水モード(ターボ機能含む)使用時の生成水に溶け込んでいる水素ガスの濃度を表示値です。

※例:300ppbは1ℓ中に300μgの水素ガスが溶け込んでいます。
※溶存水素濃度は電解条件により算出した推測値です。



●新たにターボ機能を搭載

水道水の水質は全国一律ではありません。なかには、電気分解しにくい地域もあるため、〈トリムイオン HYPER〉はターボ機能を搭載。1分間、通常の水素水モードよりも高い生成能力を発揮し、地域の水道水状況に合わせてお使いいただけます。



電 解 水 素 水

飲用やお料理に

出汁取りや野菜のアク抜き、鍋物に使っても、素材の持ち味を引き立てます。また、ご飯の炊きあがりもふっくらし、いっそうおいしくいただけます。胃腸症状の改善にも効果があると認められています。



浄 水

ミルクや薬の服用に

水に含まれる不純物16物質を除去し、ワンランク上の機能を備えています。赤ちゃんのミルクや薬の服用にお使いください。



酸 性 水

酸性水は洗顔や洗い物にお肌に近い弱酸性の水、電解酸性水も生成でき、洗顔や洗い物などにお使いいただけます。



■主な仕様

●医療機器製造販売承認番号:226AGBZX00012000●定格電圧:AC100V●定格周波数:50-60Hz●定格電流:AC5.0A●定格電解電圧:DC55V(max.)●消費電力:約300W●待機電力:約0.6W●電極(枚数):プラチナコーティング電極(5枚)●生成水取水方式:2ウェイ方式●電解槽:4槽(8セル)●電極耐久時間:電解時間として1400時間(使用量・水質等の条件によって異なります)●定格取水量:電解水素水 約4リットル/分(max.)、酸性水 約4リットル/分(max.)、浄水 約5リットル/分(max.)●本体重量:約2.8kg●電源コード長:約2.7m●本体寸法:234(W)×239(H)×112.5(D)mm●浄水カートリッジの過能力:JIS規格13物質8トン(除去率80%以上)、JIS S 3201での試験結果(試験する過流量3リットル/分)、浄水器協会自主規格3物質8トン(除去率80%以上)、浄水器協会規格基準の試験結果(試験する過流量3リットル/分)(使用量・水質等によって異なりますが、1日2リットル使用した場合で、約1年間使用できます)●電解槽洗浄方式:ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式●電源回路:スイッチング・レギュレーター制御方式●本体保護機能:分岐水検出流量弁、分岐水検出警告弁(過大水压防止)、定電流制御回路(過電流防止装置)、過熱防止装置、ヒューズ(基板内蔵)8A
※1 JIS規格13物質:①遊離残留塩素(カルキ)、②濁り、③総トリハロメタン、④クロロホルム、⑤ブロモクロロメタン、⑥ジブロモクロロメタン、⑦ブromoホルム、⑧テトラクロロエチレン、⑨トリクロロエチレン、⑩1,1,1-トリクロロエタン、⑪CAT(農薬)、⑫2-MIB(カビ臭)、⑬溶解性鉛【③総トリハロメタンとは上記①～④の4物質の総称です。】
※2 浄水器協会自主規格3物質:①ジェオスミン(カビ臭)、②フェノール類、③陰イオン界面活性剤
※本器は改良のため予告なく仕様変更することがありますので製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。

●お求め・お問い合わせは———

社団法人 日本経済団体連合会会員
社団法人 日本病院会会員
財団法人 機能水研究振興財団理事
社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員

TRIM

株式会社日本トリム 東証一部(証券コード:6788)

本 社/大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT オフィスタワー22F

TEL:06-6456-4600(代)

支 社/札幌・仙台・東京・名古屋・広島・福岡

その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

0120-328-106 http://www.nihon-trim.co.jp/